



## KISSES MASTER

Revisão: 9.0

Atualizado: 05/2025

*Dispensado de Registro do Ministério  
da Saúde conforme RDC nº 640, de  
março de 2022.*

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Descrição do Produto: **Fralda Descartável Kisses Master.**

**IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE**

Razão Social: Multi-Marcas Indústria de Produtos Higiênicos LTDA.  
Endereço: Rod. Terezópolis a Nerópolis, km 02 - Fazenda Fundão - Terezópolis de Goiás/ GO – CEP 75175-000  
Resp. Técnico: Regina Alves de Moraes Neta – CRQ/XII 12201075  
Nº AFE ANVISA/MS: 2.10083-1

**CARACTERÍSTICA DO PRODUTO**

As fraldas *Kisses Master* apresentam uma montagem cuidadosamente balanceada, que proporciona conforto e segurança durante seu uso.

Formato anatômico, três fios de elástico em cada perna e um fio em cada barreira, quatro fitas adesivas laterais reposicionáveis trilaminadas, proporcionando um perfeito ajuste ao corpo.

Dermatologicamente testada, indicador de umidade, barreiras antivazamento, sistema antiodor e alta capacidade de absorção, proporcionando até 10 horas de proteção. Indicada para adultos com incontinência urinária severa.

Seguindo todos os requisitos de qualidade e boas práticas de fabricação de acordo com a RDC nº 48, de 25 de outubro de 2013 e RDC nº 640, de março de 2022.



# KISSES MASTER

Revisão: 9.0

Atualizado: 05/2025

## COMPOSIÇÃO

Cellulose (celulose), Sodium Polyacrylate (poliacrilato de sódio), Polyethylene (polietileno), Polypropylene (polipropileno), Fios de Elástico, Adesivos Termoplásticos, Fitas Adesivas, Aloe Barbadensis Extract (Extrato de Aloe vera).

## LOTE

O lote do produto é impresso na embalagem primária, seguindo os seguintes critérios: DATA DE FAB./ LOTE/ HORA/ MÁQUINA.

## VALIDADE

Válido por três (3) anos da data de fabricação.

## INSTRUÇÕES DE USO E DESCARTE

Pessoa deitada: Vire a pessoa de lado. Coloque a fralda sob o corpo, lembrando de manter as fitas adesivas para trás. Retorne a pessoa para cima da fralda, ajuste à fralda na parte da virilha e então prenda as fitas inferiores e depois as superiores.

Pessoa em pé: Coloque a fralda entre as pernas ficando as fitas adesivas para trás. Após ajustar a fralda na virilha prenda as fitas inferiores e em seguida as superiores.

## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças. Para manutenção das características do produto, após aberto manter a embalagem fechada, em local seco, arejado e ao abrigo da luz solar direta. Em caso de irritação, suspenda o uso e consulte seu médico.



## KISSES MASTER

Revisão: 9.0

Atualizado: 05/2025

## ESPECIFICAÇÕES

## Apresentação dos Produtos

DESCRIÇÃO	Kisses Master Regular P	Kisses Master Regular M	Kisses Master Regular G	Kisses Master Regular XG	Kisses Master Econômico M	Kisses Master Econômico G	Kisses Master Econômico XG
TAMANHO DA FRALDA	P	M	G	XG	M	G	XG
CINTURA	40 a 100 cm	75 a 110 cm	100 a 150 cm	120 a 165 cm	75 a 110 cm	100 a 150 cm	120 a 165 cm
INDICAÇÃO DE PESO	Até 40 kg	40 a 70 kg	70 a 90 kg	Acima de 90 kg	40 a 70 kg	70 a 90 kg	Acima de 90 kg
INDICAÇÃO DE INCONTINÊNCIA	Severa						
QUANTIDADE FRALDAS/ PACOTE	8 fraldas	8 fraldas	8 fraldas	7 fraldas	30 fraldas	28 fraldas	26 fraldas